

Kirurginen suu-nenäsuojus

Korvalenkeillä

M-102 Sininen, kuitukangasta, 3 kerroksinen.
Kertakäyttöinen. Säilytys kuivassa ja poissa aurin-
gonvalosta. 50 kpl/ltk, 40ltk/kartonki.

II TYPE II EN 14683: 2014, 2019

BFE (%)	≥ 98
DELTA P Avg. (Pa/cm ²)	≤ 15.9
Microbial Cleanliness Avg	≤ 2 CFU/g

KÄYTTÖOHJEET

Pese kädet. Sovita suu-nenäsuojus kasvoille huolelli-
sesti ja tiiviisti. Muotoile nenäpinne painaen kahdella
sormella molemmilta puolilta nenää. Älä koskettele
suu-nenäsuojusta käytön aikana. Riisu pitämällä kiinni
korvalenkeistä. Hävitä suu-nenäsuojus välittömästi
käytön jälkeen. Älä käytä kosteata tai jo käytettyä
suu-nenäsuojusta.



KÄYTTÖTARKOITUS

- Suojaa potilasta roiskeilta, joita muodostuu lääketie-
teellisen toimenpiteen aikana leikkaussalin ulko-
puolella, mukaan lukien haavanhoito, hammashoito
yms.
- Suojaa käyttäjän lähellä olevia henkilöitä pisaroilta, joita
muodostuu kun käyttäjä yskii, puhuu tai aivastaa.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Nenäpinne galvanoidusta rautanauhasta.
Tämä takaa istuvuuden nenän ja poskien kohdalla.
- Pehmeät ja joustavat korvalenkit ovat mukavat
käyttää eri kokoisilla kasvoilla.
- Soveltuu toimenpiteisiin, joissa on minimaalinen
riski roiskeille.

